

SYSTANE® ULTRA Zvlhčující oční kapky

PŘÁBALOVÁ INFORMACE [PACKAGE INSERT]

SYSTANE® ULTRA Zvlhčující oční kapky

Tuto příbalovou informaci si prosím pečlivě přečtěte a uložte pro použití v budoucnu.

POPIS:

SYSTANE® ULTRA Zvlhčující oční kapky je sterilní roztok obsahující polyethylenglykol 400, propylenglykol, hydroxypropyl guar, sorbitol, aminometylpropanol, kyselinu boritou, chlorid draselný a chlorid sodný a konzervační látku POLYQUAD® (polidronium chlorid) 0,001%.

POUŽITÍ (indikace):

Přípravek SYSTANE® ULTRA Zvlhčující oční kapky ulevuje od příznaků suchého oka a poskytuje dočasnou úlevu od pálení a podráždění způsobeného suchostí očí. **SYSTANE® ULTRA Zvlhčující oční kapky** mohou být použity na každodenní zvlhčení povrchu očí při dlouhodobém i jednorázovém používání silikon-hydrogelových a měkkých (hydrofilních) kontaktních čoček. **SYSTANE® ULTRA Zvlhčující oční kapky** zvlhčují kontaktní čočky, snižuje nepříjemný pocit při nošení kontaktních čoček a napomáhá k odstranění nežádoucích částic, které mohou způsobit podráždění a/nebo pocit nepohodlí.

KONTRAINDIKACE (kdy by se neměl přípravek používat):

Lidé alergičtí na některou ze složek přípravku **SYSTANE® ULTRA Zvlhčující oční kapky**, by neměli přípravek používat.


POKyny PRO UŽÍVÁNÍ:

Přípravek **SYSTANE® ULTRA Zvlhčující oční kapky** lze používat po celý den dle potřeby k úlevě od příznaků suchého oka. Nakapejte kapky do oka a mrkněte. Pokud se během nošení kontaktních čoček vyskytne mírné podráždění, pocit nepohodlí nebo nejasného vidění, nakapejte 1 až 2 kapky do oka a 2-3x zamrkejte. Přípravek lze také používat před nasazením a po vyndání kontaktních čoček. Před použitím dobře protřepejte.

VAROVÁNÍ:

Je nezbytné, abyste se řídili pokyny svého očního specialisty a pokyny na obalu pro správné používání přípravku. Pokud budete pociťovat přetrvávající nepříjemné pocity v oku, oko vám bude nadměrně slzet, bude docházet ke změnám vidění nebo vám oko zčervená, poraďte se se svým očním specialistou, protože by se problém mohl zhoršit. Nenamáčejte nebo nedezinfikujte kontaktní čočky v přípravku **SYSTANE® ULTRA Zvlhčující oční kapky** kvůli možnému podráždění oka.

UPOZORNĚNÍ:

- Aby se zamezilo kontaminaci přípravku, nedotýkejte se nikdy hrotem kapátka lahvičky žádného povrchu.
- Po použití opět nasad'te ochranný uzávěr.
- Uchovávejte při pokojové teplotě.
- Pokud přípravek nepoužíváte, uchovávejte lahvičku dobře uzavřenou.
- Používejte pouze do data použitelnosti, které je vyznačeno na obalu. 

- Veškerý zbylý roztok zlikvidujte po šesti měsících od prvního otevření
- Uchovávejte mimo dosah dětí.

BALENÍ:

Přípravek **SYSTANE® ULTRA Zvlhčující oční kapky**, který je sterilizován kombinací parní sterilizace a filtrace, je dodáván v plastových lahvičkách o velikosti od 5 do 15 ml (a v balení obsahujícím více lahviček).



DISTRIBUTOR:

Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o.
Na Pankráci 1724/129
140 00 Praha 4



Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, Texas, USA 76134-2099



Alcon Laboratories (U.K.) Ltd.
Frimley Business Park
Frimley, Camberley
Surrey, GU16 7SR
Velká Británie



www.systane.cz

Datum poslední revize textu: 05/2013

©2013 Novartis